



BeneHeart R3 Electrocardiógrafo



• Dirección: Cra 47 # 76 - 60 Piso 3 • Telefono: (5) 3681391 - 320 568 5481

Cotizaciones: servicioalcliente@districlinic.com.co • Servicio tecnico: serviciotecnico@districlinic.com.co

• www.districtclinic.com.co



Especificaciones físicas

Altura:	56mm
Ancho:	260mm
Profundidad:	194mm
Peso:	1,2kg; incluidas las baterías y la fuente interna de CA

Procesamiento

Tasa de muestreo G: de análisis de EC	500 muestras/segundo (mps)
Tasa de muestreo digital:	1000 muestras/segundo/canal
Modo de adquisición:	Preadquisición o posadquisición, proporciona 10 segundos de adquisición de ECG instantánea
Rango dinámico:	Diferencial CA ± 10 mV, desfase C C ± 600 mV
Resolución:	$1 \mu\text{V}/\text{LSB}$ a 500 mps
Respuesta de frecuencia:	-3 dB a 0,05 a 150 Hz
Filtro de movimiento de línea base:	0,05 Hz, eliminación de movimiento de línea base (EMLB)
Frecuencia de corte alta:	20 Hz, 35 Hz, 150 Hz
Filtro de CA:	50/60 Hz $\pm 0,3$ Hz
Rechazo del modo común:	≥ 110 dB (con filtro de CA apagado)
Mapa ADC:	24 bits
Impedancia de entrada:	$> 50 \text{ M}\Omega$ a 10 Hz, con protección de desfibrilador
Fuga de corriente al paciente:	$< 10 \mu\text{A}$
Medidor de frecuencia cardíaca:	30 a 300 l. p. m. ± 10 % o ± 5 l. p. m., el valor que sea mayor.
Tiempo de arranque:	≤ 5 segundos
Sensibilidad/ganancia:	5, 10, 20 mm/mV, automático

Pantalla

Color:	Pantalla color de 24 bits.
Tipo de pantalla:	5 pulgadas en diagonal, relación de aspecto 16:9, TFT L con gráficos LED retroiluminados.
Resolución de pantalla:	800 x 480.
Datos visualizados:	ID de paciente, sexo, edad, frecuencia cardíaca, reloj, indicador de energía de la batería, ondas, etiquetas de derivaciones, velocidad, ajustes de ganancia y filtro, mensajes de advertencia, mensajes de ayuda, estados de la red, USB.

Energía

Suministro eléctrico:	Funcionamiento por alimentador de CA (sin adaptador de corriente externa) y a batería.
-----------------------	--

Energía por CA

Tensión de entrada:	100 a 240 VAC ± 10 %
Corriente de entrada:	60 VA
Frecuencia de CA:	50/60 Hz ± 3 Hz

Batería

Tipo de batería	Batería recargable de ión-litio
Capacidad de la batería:	11,1 V normal, 2500 mAh 6 horas de funcionamiento continuo sin grabación o 500 ECG en formato 2,5 x 4 a 25 mm/s y 10 mm/mV
Tiempo de carga de la batería:	3,5 horas con el equipo apagado



Impresora

Tecnología de la impresora:	Matriz de puntos térmica.
Ancho de la impresora:	80 mm.
Velocidad de la impresora:	5; 12,5; 25 y 50 mm/s.
Número de trazos:	3 derivaciones + 1 ritmo o 3 derivaciones; seleccionable por el usuario.
Precisión de la velocidad de la impresora:	± 5 %
Precisión de la amplitud de la impresora:	± 5 %
Resolución de la impresora:	Horizontal 32 puntos/mm a 25 mm/s; vertical 8 puntos/mm.
Tipo de papel:	Rollo de papel térmico (20 m) y papel plegado en Z (80 mm ancho, 200 hojas/paquete).

Software

Medición e interpretación:	Compatible con la medición e interpretación mediante el algoritmo de análisis de ECG de la Universidad de Glasgow.
Modo de ECG en reposo:	Registra e imprime ECG de 12 derivaciones en reposo con una duración de 10 segundos como función estándar.
Información del paciente aceptada:	ID del paciente, ID secundaria, edad, fecha de nacimiento, sexo, raza, medicamentos, clase, colocación de electrodo V3.
Almacenamiento interno:	800 ECG en la memoria interna.
Formato de almacenamiento de ECG:	Formato PDF y formato de almacenamiento Mindray.

Formatos de los informes

Formato de informes de la impresora térmica:	4por 2,5 s (secuencial) 4 por 2,5 s compacto 4 por 2,5 s + 1 derivación de ritmo. 4 por 2,5/5/7,5/10 s (simultáneo). Ritmo automático (datos de ECG de 60 segundos para 1 derivación de ritmo). Ritmo manual continuo de 1 o 3 canales.
Formato de informe en PDF (formato A4/carta)	4 por 2,5 s + 1 derivación de ritmo 2 por 5 s 2 por 5 s + 1 derivación de ritmo 1 por 10 s

Accesorios

Cable de ECG para paciente con enchufes tipo banana, broches para las extremidades y electrodos para el pecho (IEC/AHA).
Cable de ECG con clips para electrodos (IEC/AHA)
Cables de alimentación específicos para cada país
Papel plegado en Z y en rollo

Especificaciones ambientales

Temperatura

Funcionamiento:	0 °C a 40 °C
Transporte / almacenamiento:	-20 °C a 60 °C

Humedad

Funcionamiento:	15 a 95 % de HR sin condensación
Transporte / almacenamiento:	10 a 95 % de HR sin condensación

Presión

Funcionamiento:	57,0 kPa a 107,4 kPa
Transporte / almacenamiento:	16,0 kPa a 107,4 kPa



• Dirección: Cra 47 # 76 – 60 Piso 3 • Teléfono: (5) 3681391 - 320 568 5481

• Cotizaciones: servicioalcliente@districlinic.com.co • Servicio técnico: serviciotecnico@districlinic.com.co



• www.districtclinic.com.co

BeneHeart R3

Electrocardiógrafo

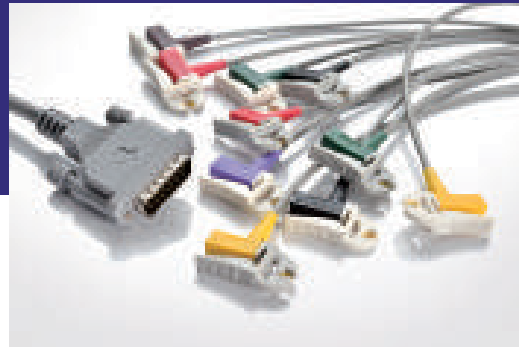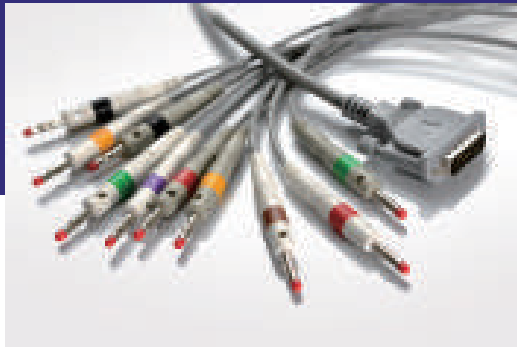


mindray
healthcare within reach

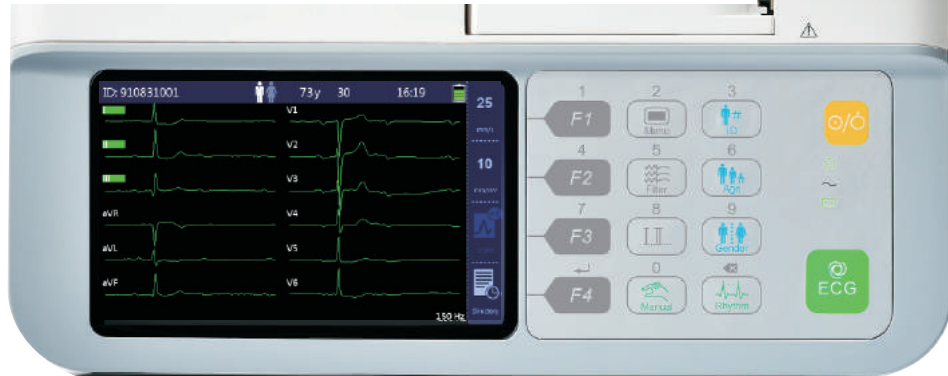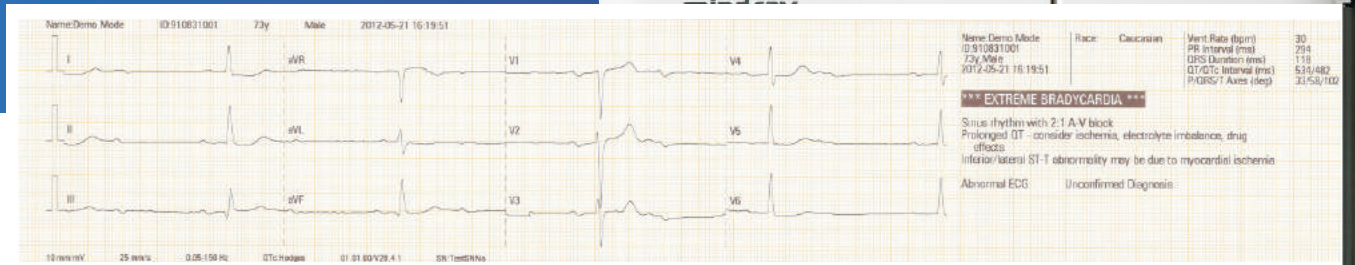


El algoritmo de Glasgow es el primer algoritmo que toma en cuenta la edad, el sexo, la raza, los medicamentos y la clase para realizar un diagnóstico. Maximiza la precisión de los diagnósticos y resulta de especial importancia para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Destaca los resultados diagnóstico críticos, tales como infarto agudo de miocardio, isquemia aguda de miocardio, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia grave y arritmia maligna, de forma tal que el personal médico pueda identificar el problema y brindar tratamiento oportuno.

A fin de brindar una mayor precisión en el diagnóstico de cardiopatías pediátricas, el electrodo V3 se reemplaza con el electrodo V4R y se provee el algoritmo e informe diagnóstico que correspondan.

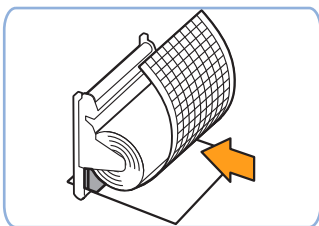

Con papel en rollo

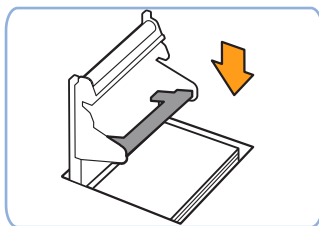

Con papel plegado en Z

Registrador Exclusivo

Los papeles en rollo y plegados en Z que sean compatibles con el equipo pueden cambiarse en cualquier momento. La palanca de papel plegado en Z pueden guardarse fácilmente sin necesidad de desarmarla.

Análisis Confiable

Como uno de los líderes mundiales en algoritmos de ECG en reposo, el algoritmo Glasgow, de renombre mundial, es famoso por su exploración precisa en el campo de los ECG y por las mejoras constan en el profesionalismo durante los últimos 50 años. Mindray ha integrado este tipo de profesionalismo a los productos para ECG.

- Direccion: Cra 47 # 76 - 60 Piso 3
- Telefono: (5) 3681391 - 320 568 5481
- Cotizaciones: servicioalcliente@districlinic.com.co
- Servicio tecnico: serviciotecnico@districlinic.com.co
- www.districtclinic.com.co



Claridad de la Pantalla

La pantalla a color de 5 pulgadas, la alta resolución de 800x480 y la visualización clara de las ondas en tiempo real ofrecen una cómoda experiencia visual.

Portabilidad Destacada

Con un peso de tan sólo 1,2 kg (incluidas las baterías), el personal médico puede transportar fácilmente este equipo.

Funcionamiento Práctico

El papel de registro puede colocarse de forma cómoda sobre el tablero del equipo para que los médicos lo firmen y realicen marcaciones.